

タオル・スチームカート / (新・清拭車) ラインアップ ご案内

さらに安全に使いやすく、オートセーブ検知機能付
確かな消毒おしぼりをつくります

特 徴

■高精度・フルオート／省電力運転モード

±1℃の緻密な温度制御を行い、保温時は省電力モードで運転します

■オートセーブ検知機能付

マイコンが各種の異常を監視、LEDとアラーム動作で内容を知らせます



B-10NB おしぼり50本用
(専用台車は別売です)

B-12NB(ブルー)
おしぼり100本用

型 番	商品コード	価 格
B-10NB	742411	¥147,000
専用台車	785111	¥36,000

- 材質 SUSステンレス／外装：カラー塗装
- キャスター 径50mm (オプション専用台)
- 付属品 SUSカゴ 2個・樹脂バスケット大 1個
- 電源 AC100V 5A 50/60HZ
- 本体サイズ W380×D320×H400mm

型 番	商品コード	価 格
B-15NS	742400	¥298,000

- 材質 SUSステンレス
- キャスター 径120mm 静走キャスター ※
- 付属品 SUSカゴ 大 2個・樹脂バスケット大 2個
- 電源 AC100V 13.5A 50/60HZ
- 本体サイズ W860×D450×H870mm

※キャスターは現行品と異なります。




B-12NP(ピンク)
おしぼり100本用

型 番	商品コード	価 格
B-12NP(ピンク)	742422	¥238,000
B-12NB(ブルー)	742421	¥238,000

- 材質 SUSステンレス／外装：カラー塗装
- キャスター 径120mm 静走キャスター ※
- 付属品 SUSカゴ 4個・樹脂バスケット 3個
- 電源 AC100V 8.5A 50/60HZ
- 本体サイズ W680×D320×H870mm

■マイコン・タッチパネル(ブルー)

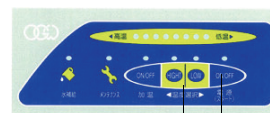

<操作手順>

- ①電源SW スタートON
 - ②保温H/L 選択 (タオル温度高め/低め)
- ①②だけの簡単操作、自動で加熱から保温に進行します。



B-15NS
手ぬぐいタオル 100本用


仕様とデザインは予告なく変更される場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

◆ 各種安全機能のご案内 ◆

マイコンによるオートセーブ検知機能付き

機器に異常があると、不具合箇所を各コール機能がお知らせします。
メンテナンスコールが作動して給電を自動停止するので安全・安心です。

＜マイコン操作・タッチパネル＞

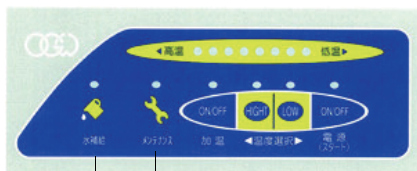

低水位警報 ———— メンテナンスコール・お知らせ機能

＜オートセーブ検知(メンテナンスコール機能)＞

- 低水位の水量エラーを検知
- 万一のから炊き、温度異常過昇を防止
- ヒーターリレー(トライアック)の不良を検知
- ヒーター(負荷)の結線不良・断線を検知
- 漏電を検知、人へのマクロショック事故を防止

◆ おしぼりの消毒効果試験・データのご案内 ◆

● 清拭車 : B-12NP/B (手拭いタオル100本用)

小川医理器株式会社製

● タオル : 林製作所 / 34cm × 42cm・厚地

● 温度検知 : ヤマタケハネウェル製 R7031Q
シンワサーモメーター (アルコール)

● 検査室温 : 26°C(湿度65%)

● 測定部位



A ---●--- 槽内中央寄、タオル98本、保温(H)

B ———●—— 槽内中寄コーナー、タオル98本、保温(L)

C - - - ● - - - 槽内コーナー(角寄)、タオル 80本、保温(H)

＜試験内容＞ [巻きタオル芯部での、85°C 1分間の
スチーム被熱効果の確認]

■ 温度/時間の推移 ■

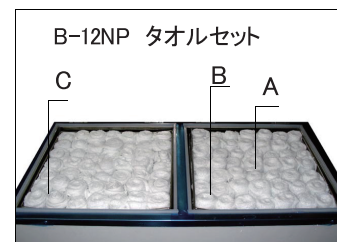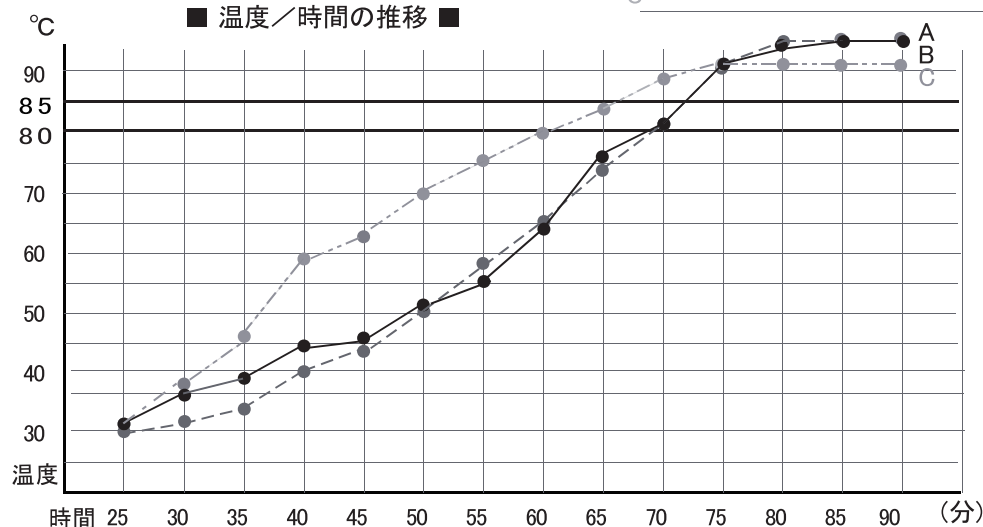

巻きタオル芯部深くに
センサーをセット

スタート ———— 標準1工程(加温・蒸し上げ) ———— 自動保温工程

● 清拭車 : B-12NP/B
(おしぼりタオル 100本用)

● 試供菌種
MRSA・緑膿菌

● 運転モード
スタート加温から自動
蒸し上げ、保温(H)に
至る標準行程85分後
の被験菌数を測定

＜おしぼりの消毒効果試験／被験菌 : MRSA・緑膿菌＞

被験菌名	MRSA		緑膿菌 : <i>Ps. aeruginosa</i>	
	(CFU/0.2g 相当) 初期値 1.2×10^9	(CFU/枚 換算) 初期値 5.5×10^{10}	(CFU/0.2g 相当) 初期値 2.4×10^9	(CFU/枚 換算) 初期値 1.1×10^{12}
測定おしぼり				
容器内(右側)	<10	<500	<10	<500
容器内(中央)	<10	<500	<10	<500
容器内(左側)	<10	<500	<10	<500

<10、<500 : 検出せず

厚生労働省指定検査機関
社団法人 京都微生物研究所