

タオル・スチームカート／（清拭車） ラインアップ ご案内

■高精度・フルオート／省電力運転モード

±1℃の緻密な温度制御を行い、保温時は省電力モードで運転します

■オートセーブ検知機能付

マイコンが各種の異常を監視、LEDとアラーム動作で内容を知らせます

■マイコン・タッチパネル（ブルー）



<操作手順>

- ①電源SW スタートON
- ②保温H/L 選択
(タオル温度高め/低め)

①②だけの簡単操作、自動で加熱から保温に進行します。



B-12NP(ピンク)
おしぼり100本用

B-12NB(ブルー)
おしぼり100本用

型番	商品コード
B-12NP(ピンク)	742422
B-12NB(ブルー)	742421

- 材質 SUSステンレス／外装:カラー塗装
- キャスター 径100mm 双輪キャスター
- 付属品 SUSカゴ 4個・樹脂バスケット 3個
- 電源 AC100V 8.5A 50/60Hz
- 本体サイズ W680×D320×H870mm

型番	商品コード
B-10NB	742411
専用台車	785111

- 材質 SUSステンレス／外装:カラー塗装
- キャスター 径50mm (オプション専用台)
- 付属品 SUSカゴ 2個・樹脂バスケット 1個
- 電源 AC100V 5A 50/60Hz
- 本体サイズ W380×D320×H400mm



B-10NB おしぼり50本用
(専用台車は別売です)



B-15NS
手ぬぐいタオル 100本用

型番	商品コード
B-15NS	742400

- 材質 SUSステンレス
- キャスター 径100mm 双輪キャスター
- 付属品 SUSカゴ大 2個・樹脂バスケット大 2個
- 電源 AC100V 13.5A 50/60Hz
- 本体サイズ W860×D450×H870mm

仕様とデザインは予告なく変更される場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

ogw

発売元 小川医理器株式会社

本社 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷 64
TEL 0774-44-5161 FAX 0774-44-5576
<http://www.ogw-med.com>

◆ 各種安全機能のご案内 ◆

マイコンによるオートセーブ検知機能付き

機器に異常があると、不具合箇所を各コール機能がお知らせします。
メンテナンスコールが作動して給電を自動停止するので安全・安心です。

＜マイコン操作・タッチパネル＞



低水位警報 ———— メンテナンスコール・お知らせ機能

＜オートセーブ検知(メンテナンスコール機能)＞

- 低水位の水量エラーを検知
- 万一のから炊き、温度異常過昇を防止
- ヒーターリレー(トライアック)の不良を検知
- ヒーター(負荷)の結線不良・断線を検知
- 漏電を検知、人へのマクロショック事故を防止

◆ おしぼりの消毒効果試験・データのご案内 ◆


- 清拭車: B-12NP/B(おしぼり 100本用)
小川医理器株式会社製
- タオル: 林製作所/34cm×42cm・厚地
- 温度検知: ヤマタケハネウェル製 R7031Q
シンワサーモメーター(アルコール)
- 検査室温: 26℃(湿度65%)

＜試験内容＞[おしぼり芯部での、85℃ 1分間の
スチーム被熱効果の確認]


■ 温度/時間の推移 ■

● 測定部位

- A ———— 槽内中央寄、おしぼり98本、保温(H)
- B ———— 槽内中央寄コーナー、おしぼり98本、保温(L)
- C ———— 槽内コーナー(角寄)、おしぼり80本、保温(H)

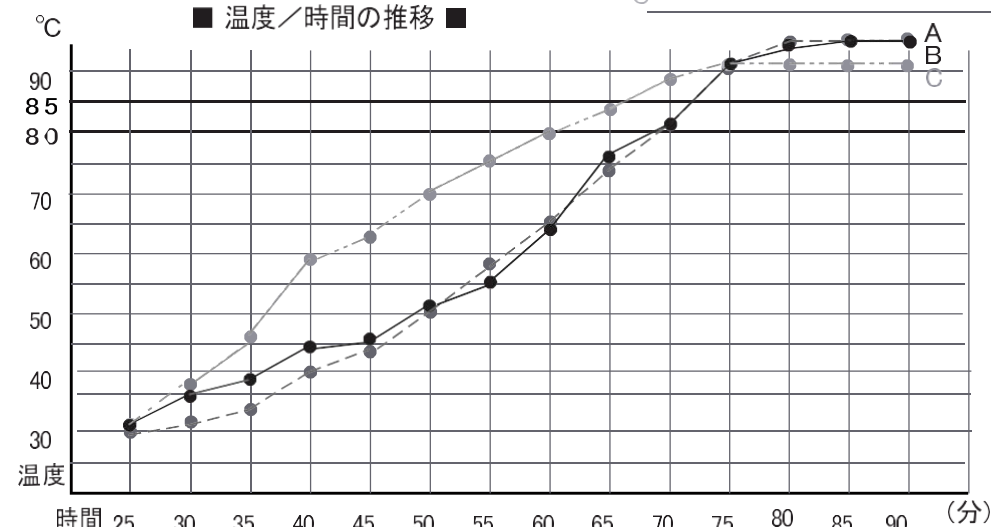

スタート ———— 標準1工程(加温・蒸し上げ) ———— 自動保温工程

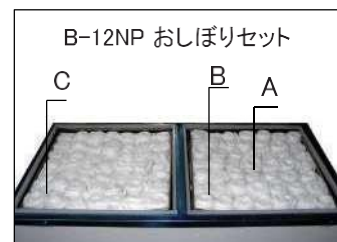

芯部近くにセンサーをセット

- 清拭車: B-12NP/B
(おしぼり 100本用)

- 試供菌種
MRSA・緑膿菌

- 運転モード
スタート加温から自動
蒸し上げ、保温(H)に
至る標準工程85分後
の被験菌数を測定

＜おしぼりの消毒効果試験／被験菌：MRSA・緑膿菌＞

被験菌名	MRSA		緑膿菌: <i>Ps. aeruginosa</i>	
	(CFU/0.2g 相当) 初期値 1.2×10^5	(CFU/枚 換算) 初期値 5.5×10^{10}	(CFU/0.2g 相当) 初期値 2.4×10^9	(CFU/枚 換算) 初期値 1.1×10^{12}
測定おしぼり				
容器内(右側)	<10	<500	<10	<500
容器内(中央)	<10	<500	<10	<500
容器内(左側)	<10	<500	<10	<500

<10、<500：検出せず

厚生労働省指定検査機関
社団法人 京都微生物研究所